


Πρόγραμμα SmartLink 3.0

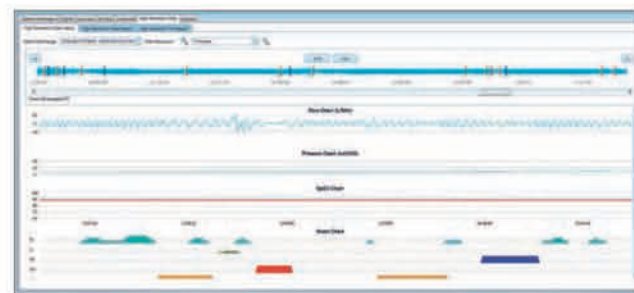

| Usage Statistics | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Total Hours Used: | 1,4 Hours | | |
| Pressure Statistics | | | |
| Average Pressure: | 4,1 mbar | Standard Deviation: | ±0,8 mbar |
| 95th Percentile Pressure: | 5,0 mbar | 95th Percentile Pressure: | 5,0 mbar |
| Max Pressure: | 6,0 mbar | | |
| Leak Statistics | | | |
| Average Leak: | 19,0 L/Mn | Standard Deviation: | ±2,0 L/Mn |
| 95th Percentile Leakage: | 22,0 L/Mn | % Poor Mask Fit: | 0,0% of total |
| Event Statistics | | | |
| Apnea/Hypopnea Index: | 6,0 Per hour | Hypospnea Index: | 8,0 Per hour |
| Central Apnea Index: | 0,0 Per hour | Obstructive Apnea Index: | 0,0 Per hour |

SMART LINK 3.0

Το λογισμικό του SmartLink 3.0 είναι ιδανικό για εργαστήρια ύπνου και παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης, γιατί παρακολουθεί τη χρήση CPAP, τη συμμόρφωση των ασθενών και αξιολογεί την επιτυχία της θεραπείας με CPAP.

Ένα νέο χαρακτηριστικό του SmartLink 3.0 είναι η δυνατότητα να εμφανίσει και να αναλύσει μέχρι και 100 ώρες δεδομένων υψηλής ανάλυσης που καταγράφονται από το DeVilbiss Blue για μια πιο εμπειριστατωμένη και ακριβή άποψη των ασθενών.

Specifications

Dimensions (H x W x D)

CPAP 9.4 x 15.5 x 15 cm / CPAP & Humidifier 16.1 x 15.5 x 19.3 cm

Weight

CPAP 0.9 kg / CPAP & Humidifier 1.75 kg

Pressure Range

3 - 20 cm H₂O

Airline Transport Approved

DeVilbiss Healthcare has a policy of continuing improvement, we therefore reserve the right to vary details at any time without notice. DeVilbiss Blue is a registered trademark of DeVilbiss Healthcare.

DeVilbiss BLUE

Απόδοση - Άνεση - Σύνδεση

Από τη σύλληψη στην ολοκλήρωση βρήκαμε τον τρόπο πώς μια συσκευή CPAP θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν τον καλύτερο δυνατό ύπνο.

Το NEO CPAP DeVilbiss BLUE χρησιμοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του ύπνου για να προσφέρει εξαιρετική απόδοση, μέγιστη άνεση και τη δυνατότητα να παρακολουθεί με τον καλύτερο τρόπο τη θεραπεία του ασθενούς.

Απόδοση • Άνεση • Συνδεσιμότητα

Εντοπίζει περισσότερα για να αντιμετωπίζει περισσότερα...

Ένα νέο επίπεδο απόδοσης και δεδομένων με το NEO CPAP DeVilbiss BLUE. Από τον προηγμένο αλγόριθμο μέχρι και τη δημιουργία αθόρυβου κινητήρα, έχουμε σχεδιάσει το NEO CPAP DeVilbiss BLUE για να βοηθήσει τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο να επιτύχει τον καλύτερο δυνατό ύπνο.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η Pulse Dose ύγρανση, το SmartFlex και η ελεγχόμενη ροή έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσουν την άνεση στον ασθενή για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας με τη συσκευή CPAP.

Αφού βεβαιωθείτε ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία με το CPAP είναι ζωτικής σημασίας η συμμόρφωση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδεθείτε, για τη μεταφορά και την ανάλυση των δεδομένων θεραπείας με το DeVilbiss Blue. Οι επιλογές ασύρματης συνδεσιμότητας μας επιτρέπουν να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του CPAP εξ αποστάσεως και άμεσα για την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών.



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

CE 0044

Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston/Stourbridge
West Midlands DY8 4PS
England

Phone + 44 (0) 13 84 44 68 58
Fax + 44 (0) 13 84 44 66 28
www.devilbisshealthcare.com
enquiries@devilbisshc.com

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:
SUNMED
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.

Κεντρικά: Ηρακλείου 97-99, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-6003414 | Φαξ: 210-6015095
www.sunmed.gr | e-mail: sunmed@otenet.gr

Υποκαταστήματα:

Σιαμανογλείου 35, Μαρούσι
Τηλ.: 210-6095516

Ιπποκράτους 12, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310-79080

Κελεού 36, Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5545024

27/15-V08-SD-000961001.UK

CE 0044

Απόδοση

Ένας ισχυρός νέος αλγόριθμος ανιχνεύει και ανταποκρίνεται στα γεγονότα.

Ο αλγόριθμος του NEO CPAP DeVilbiss BLUE θέτει ένα νέο πρότυπο δεδομένων και απόδοσης. Η βελτιωμένη ευαισθησία σε ένα πλήρες φάσμα αναπνευστικών επεισοδίων σημαίνει ότι ανιχνεύει περισσότερα δεδομένα και ανταποκρίνεται με ένα νέο επίπεδο ακρίβειας, δίνοντας στο χρήστη μια πιο άνετη εμπειρία. Επιτρέπει στο NEO CPAP DeVilbiss BLUE να διαφοροποιήσει την Αποφρακτική Άπνοια από πιο σύνθετες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Άπνοιας και άλλων σύνθετων:


Υπόπνοια, αποφρακτική άπνοια, ροχαλητό, εκπνοή, εισπνοή, διαρροές, περιορισμό ροής, RERAs, κεντρική άπνοια, περιοδική αναπνοή, όλα τώρα εντοπίζονται με το NEO CPAP DeVilbiss BLUE.

Ασυναγώνιστη απόδοση μέσα από ένα απίστευτα ήσυχο μοτέρ.


Στην καρδιά του CPAP είναι το μοτέρ του ανεμιστήρα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του NEO CPAP DeVilbiss BLUE, οι σχεδιαστές μας ξεκίνησαν από τη βάση μέχρι το σχεδιασμό του μοτέρ προκειμένου να παρέχει ισχυρές, σταθερές και ακριβείς πιέσεις.

Εύκολο στη ρύθμιση, εύκολο στη χρήση.

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη και ο κεντρικός επιλογέας, κάνουν τη ρύθμιση και τη χρήση του NEO CPAP DeVilbiss BLUE απίστευτα απλή. Οι γραφικές απεικονίσεις των λειτουργιών, όπως του SmartFlex και της ροής απεικονίζονται εύκολα. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη δείχνει μέσω του SmartFlex τη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της εκπνοής.

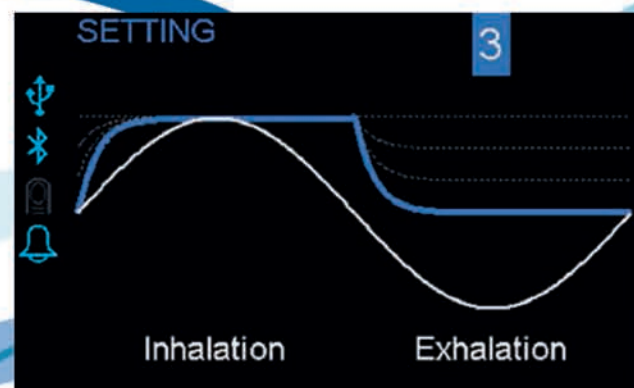

Large colour display showing SmartFlex reducing the pressure during exhalation.

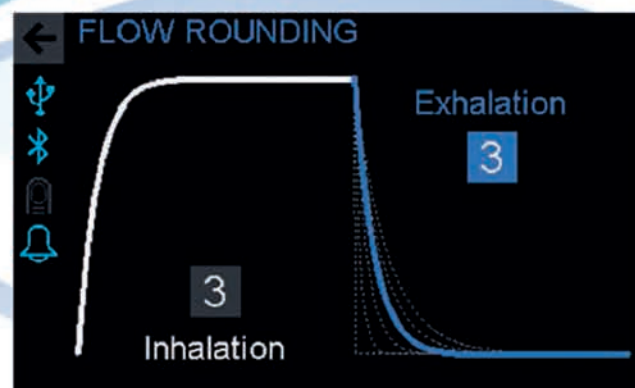

Display showing Flow Rounding setting a smooth transition between pressure levels.

Άνεση

DeVilbiss Blue
Μέγιστη άνεση

Η PulseDose υγρανση είναι μια νέα τεχνική που αναπτύχθηκε από τη DeVilbiss για την καταπολέμηση της ρινικής συμφόρησης και τη ξηρότητα στο λαιμό και στη μύτη.

Λειτουργεί παρέχοντας θερμαινόμενο υγρό αέρα κατά τη διάρκεια της εισπνοής μόνο, και μη υγροποιημένο αέρα κατά την εκπνοή. Αυτό δίνει τη μέγιστη άνεση στο χρήστη, ενώ διατηρεί την υγρασία εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 8 ώρες αδιάκοπο ύπνο.

Η PulseDose υγρανση καταναλώνει το λιγότερο νερό σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς θερμαινόμενους υγραντήρες. Παρέχονται και οι 2 τύποι υγραντήρα ως προαιρετικά αξεσουάρ.

Χωρίς συντήρηση

Εκτός από τον τακτικό καθαρισμό του φίλτρου, το CPAP DeVilbiss Blue έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη χρειάζεται συντήρηση για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με την υψηλότερη ποιότητα από εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, στην εταιρεία μας στο Somerset της Αμερικής.

Σύνδεση

DeVilbiss Blue
Παρακολούθηση και βελτίωση της θεραπείας του ύπνου σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Η διατήρηση της θεραπείας είναι ζωτικής σημασίας για τη φροντίδα των ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου. Είναι σε θέση να παρακολουθεί τα δεδομένα και να ανταποκρίνεται γρήγορα, εάν απαιτούνται οποιεσδήποτε αλλαγές, βελτιώνει τη συμμόρφωση του ασθενούς που οδηγεί σε έναν καλύτερο ύπνο το βράδυ. Το DeVilbiss Blue διαθέτει πολλούς νέους τρόπους για μετάδοση και λήψη δεδομένων, για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της θεραπείας του ύπνου.

SmartCode

Ένας καινοτόμος τρόπος για την απομακρυσμένη μετάδοση των δεδομένων μέσω Internet.

Κάρτα SD / USB

Το DeVilbiss Blue διαθέτει μια θύρα για να επιτρέψει την άμεση σύνδεση USB με τον υπολογιστή ή τα δεδομένα μπορούν να σταλούν και να λαμβάνονται μέσω κάρτας SD.

